

Ergebnisse

Das Resultat ist nach 3-monatiger Behandlung mit **Cerederm**® sichtbar, die Narbe ist deutlich verbessert, glatter, weicher und weniger rot



Hypertrophe Narbe



Resultat nach 3-monatiger Behandlung

Indikation:

Narben nach Verbrennungen, chirurgischen Eingriffen, Unfällen oder Hautreaktionen.

Kontraindikation:

Nicht bei offenen, nässenden oder entzündeten Wunden, Ulkus, Dekubitus, nicht verheilten Verbrennungen oder auf Schleimhäuten verwenden. Im Falle von Hautreaktionen bitte die Behandlung unterbrechen.

Verfügbare Größen

5 x 8 cm

10 x 20 cm


5 x 30 cm

In Tubengröße
15g/50g erhältlich.

Ancre
13 x 22 cm

Couronne
Ø 8 cm

Lipostick - Packung mit je 10 Stück

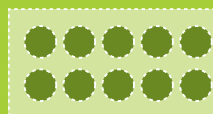

makro-med GmbH medical products
Fleischstr. 62 D-54290 Trier

mail: info@makro-med.de | web: www.makro-med.de
fon: +49 (0)651 4639 9000 | fax: +49 (0)651 4639 9009

CEREDERM®

Selbstklebendes Silikonpflaster für ein erfolgreiches Narbenmanagement

Einfach anzuwenden
Gut haftend
Wiederverwendbar
Kostengünstig
Transparent



CEREDERM®

Selbstklebendes Silikonpflaster für die dauerhafte Narbenpflege und ein erfolgreiches Narbenmanagement

Cerederm® ist eine selbstklebende Silikonfolie zur Behandlung von Narben - unsichtbar und einfach anzuwenden. Das dazu passend entwickelte **Cerederm® Gel** lindert den Juckreiz, weicht die Narbe auf und reduziert deren Rötung. Das medizinische Silikon glättet die Narbe und schränkt deren Entwicklung ein.

Cerederm® ist besonders effektiv bei hypertrophen (rötlichen) oder keloiden (erhabenen, fibrösen, festen und dicken), sowohl alten als auch jungen Narben.

Alle Komponenten der **Cerederm®**-Folie wurden aufgrund ihrer Bioverträglichkeit ausgewählt.

Gebrauchsanweisung

Um eine optimale Effizienz zu erzielen sollte Cerederm die Narbe mehr als 1 cm überdecken. Die Folie sollte über einen Behandlungszeitraum von 2 bis 6 Monaten längstens 5 Tage am Stück angewendet werden. Idealerweise verbleibt die Folie 24 Stunden an der zu behandelnden Stelle. Die Folie muss ersetzt werden, wenn die Klebeeigenschaft der Folie nachlässt.

Die in der Silikonfolie enthaltenen Inhaltsstoffe gewährleisten, zusammen mit einer exklusiven Technologie, perfekten Halt auf der Haut und ermöglichen ein schmerzfreies Entfernen der Folie.

- Leicht zu schneiden; an jede Narbengröße anpassbar
- Flexibel und gut haftend
- Schmerzfrei und komfortabel 24 Stunden am Tag tragbar

- Weich, dünn & transparent für optimale Diskretion.
- Selbsthaftend - bleibt perfekt in Position.
- Abwaschbar
- Folie kann über einen Zeitraum von bis zu 5 Tagen durchgängig getragen werden



1. Nehmen Sie den Verband aus seiner Verpackung. Sie können die Folie auf die gewünschte Größe zuschneiden, sodass die Narbe komplett abgedeckt wird (mindestens 1 cm sollte überstehen).



2. Platzieren Sie die Folie Cerederm mit der klebenden Seite auf der Narbe und entfernen Sie die Schutzfolie sanft und gleichmäßig.



3. Verwenden Sie nur die Cerederm Silikonfolie; es ist nicht erforderlich zusätzliche Creme aufzutragen. Dennoch können Sie (falls gewünscht) zur weiteren Unterstützung eine elastische Bandage oder Cerecare® Kompressionswäsche verwenden.



4. Reinigen Sie die Narbe und die Silikonfolie einmal am Tag mit klarem Wasser und einer neutralen Seife. Reinigen Sie dabei zuerst die eine und anschließend die andere Hälfte, um ein späteres Wiederanbringen zu ermöglichen.